



T.E.D.™ anti-emboli-strømper MÅLSKEMA - DETAIL



BRUGSANVISNING



1
Før hånden ind i strømpen og tag fat i hældelen.



2
Vend vrangen ud på strømpen.




3
Anbring strømpen på foden. Anbring tåhullet, så det hænger under tæerne. Kontrollér, at patientens hæl er centreret i hældelen.



4
Når lægdelen er ført på, skal strømpen drejes indad, hvor trykket brydes, så kilen placeres over arteria femoralis (mod lårets inderside). Stingskiftet i skridtlængdestrømpen skal være 3-5 cm under knæet (toppen af knæstrømpen skal være 3-5 cm under knæet).

MÅLTAGNING

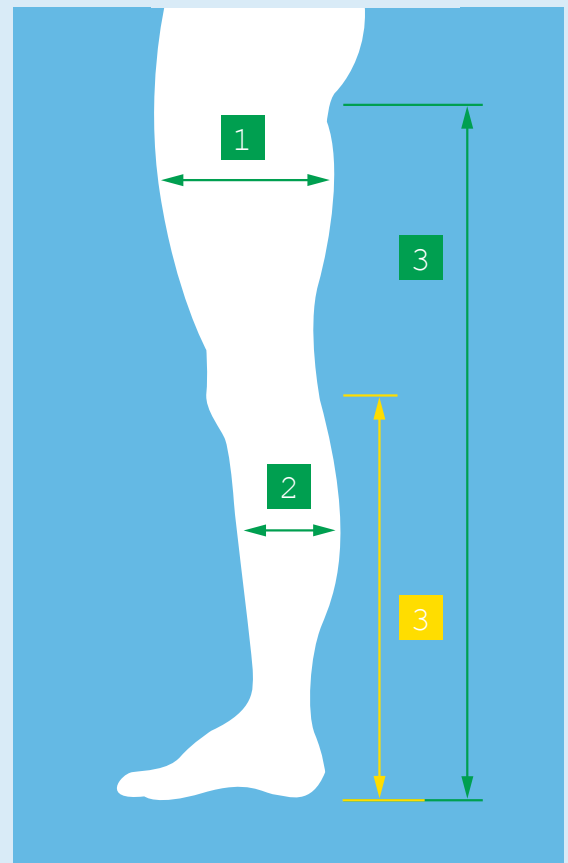

Måltagning : De ovenstående numrer kan findes i Målskemaet på bagsiden.



KNÆLANGE

Lægomkreds 2	Lægstr.	Benlængde 3	Genbestillings nummer HVID	Genbestillings nummer BEIGE	Genbestillings nummer SORT	Salgsenhed	Farve		
							Tå	Top	
Mindre end 30,5cm	SMALL	Mindre end 41cm	NORMAL	7071	BEI7071	BLK7071	1 par		
		41cm og mere	X-LANG	7339	BEI7339	BLK7339	1 par		
30,5cm til 38cm	MEDIUM	Mindre end 43cm	NORMAL	7115	BEI7115	BLK7115	1 par		
		43cm og mere	X-LANG	7480	BEI7480	BLK7480	1 par		
38cm til 44,5cm	LARGE	Mindre end 46cm	NORMAL	7203	BEI7203	BLK7203	1 par		
		46cm og mere	X-LANG	7594	BEI7594	BLK7594	1 par		
44,5cm til 51cm	X-LARGE	Mindre end 46cm	NORMAL	7604	BEI7604	BLK7604	1 par		
		46cm og mere	X-LANG	7802	BEI7802	BLK7802	1 par		
51cm til 58,4cm	XX-LARGE	Mindre end 46cm	NORMAL	7470	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		46cm og mere	X-LANG	7471	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
58,5cm til 66cm	XXX-LARGE	Mindre end 46cm	NORMAL	7472	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		46cm og mere	X-LANG	7473	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		

KONTRAINDIKATIONER: Massivt ødem i ben eller lungeødem på grund af kongestiv hjerteinsufficiens, alvorlig aterosklerose, ekstrem benedeformitet, lokal tilstand i benene, f.eks. dermatitis/gangræn/nylig hudgraft.



SKRIDTLANGE

Låromkreds 1	Lægomkreds 2	Benlængde 3	Genbestillings nummer HVID	Genbestillings nummer BEIGE	Genbestillings nummer SORT	Salgsenhed	Farve		
							Tå	Top	
Mindre end 63,5cm	Mindre end 31cm SMALL	Mindre end 74cm	KORT	3071	BEI3071	BLK3071	1 par		
		74cm til 84cm	NORMAL	3130	BEI3130	BLK3130	1 par		
		84cm eller mere	LANG	3222	BEI3222	BLK3222	1 par		
Mindre end 63,5cm	31cm til 38cm MEDIUM	Mindre end 74cm	KORT	3310	BEI3310	BLK3310	1 par		
		74cm til 84cm	NORMAL	3416	BEI3416	BLK3416	1 par		
		84cm eller mere	LANG	3549	BEI3549	BLK3549	1 par		
Mindre end 63,5cm	38cm til 45cm LARGE	Mindre end 74cm	KORT	3634	BEI3634	BLK3634	1 par		
		74cm til 84cm	NORMAL	3728	BEI3728	BLK3728	1 par		
		84cm eller mere	LANG	3856	BEI3856	BLK3856	1 par		
63,5 til 81cm	38cm til 45cm EXTRA LARGE	Mindre end 74cm	KORT	4010	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm til 84cm	NORMAL	4114	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		84cm eller mere	LANG	4216	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
63,5 til 81cm	38cm til 45cm	Mindre end 74cm	KORT	3180	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm til 84cm	NORMAL	3181	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		84cm eller mere	LANG	3182	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
81,3 til 91,4cm	38cm til 45cm EXTRA LARGE	Mindre end 74cm	KORT	3183	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm til 84cm	NORMAL	3184	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		84cm eller mere	LANG	3185	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		

OBS: Skridtlange strømper er ikke selvbyggende, og det kan være nødvendigt at benytte hofteholder.



SKRIDTLANGE M. BÆLTE

Låromkreds 1	Lægomkreds 2	Benlængde 3	Genbestillings nummer HVID	Genbestillings nummer BEIGE	Genbestillings nummer SORT	Salgsenhed	Farve		
							Tå	Top	
Mindre end 63,5cm	Mindre end 25cm X-SMALL	Mindre end 71cm	NORMAL	3039	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		71cm eller mere	LANG	3364	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
Mindre end 63,5cm	25 til 30,5cm SMALL	Mindre end 72cm	NORMAL	3144	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		72cm eller mere	LANG	3449	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
Mindre end 63,5cm	30,5 til 38cm MEDIUM	Mindre end 72	NORMAL	3221	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		75cm eller mere	LANG	3523	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
Mindre end 63,5cm	38 til 44,5cm LARGE	Mindre end 74cm	NORMAL	3922	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm eller mere	LANG	3995	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		

TED er et varemærke tilførende Covidien AG eller et associeret selskab. Alle rettigheder forbeholdes.