



T.E.D.™ anti-emboli-strømper MÅLSKEMA - GROSSIST



BRUGSANVISNING



1
Før hånden ind i strømpen og tag fat i hældelen.



2
Vend vrangen ud på strømpen.




3
Anbring strømpen på foden. Anbring tåhullet, så det hænger under tæerne. Kontrollér, at patientens hæl er centreret i hældelen.



4
Når lægdelen er ført på, skal strømpen drejes indad, hvor trykket brydes, så kilen placeres over arteria femoralis (mod lårets inderside). Stingskiftet i skridtlængdestrømper skal være 3-5 cm under knæet (toppen af knæstrømper skal være 3-5 cm under knæet).

MÅLTAGNING

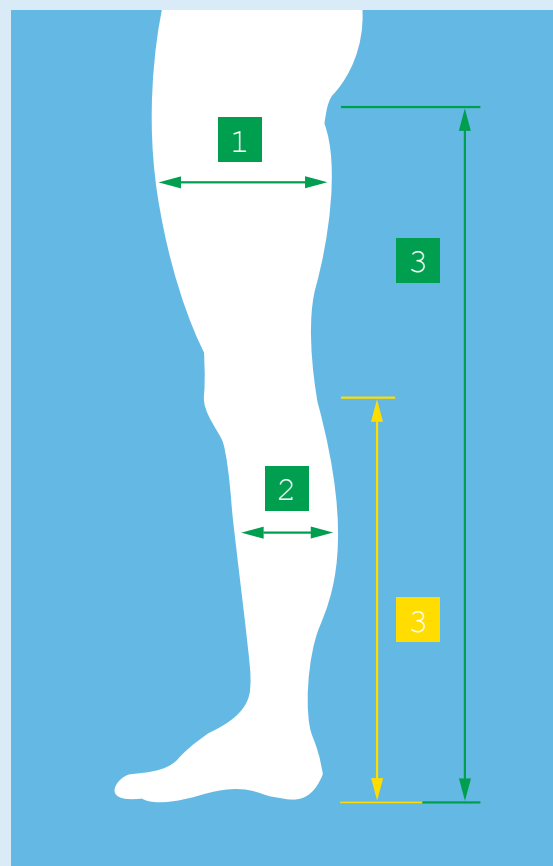

Måltagning : De ovenstående numrer kan findes i Målskemaet på bagsiden.



KNÆLANGE

Lægomkreds 2	Lægstr.	Benlængde 3	Genbestillings nummer HVID	Genbestillings nummer BEIGE	Genbestillings nummer SORT	Salgsenhed	Farve	
							Tå	Top
Mindre end 30,5cm	SMALL	Mindre end 41cm NORMAL	750471	799924	200345	1 par		
		41cm og mere X-LANG	750513	799957	200022	1 par		
30,5cm til 38cm	MEDIUM	Mindre end 43cm NORMAL	750489	799932	200066	1 par		
		43cm og mere X-LANG	750521	799965	200048	1 par		
38cm til 44,5cm	LARGE	Mindre end 46cm NORMAL	750497	799940	200014	1 par		
		46cm og mere X-LANG	750539	799973	200055	1 par		
44,5cm til 51cm	X-LARGE	Mindre end 46cm NORMAL	750505	799981	200147	1 par		
		46cm og mere X-LANG	764506	799999	200162	1 par		
51cm til 58,4cm	XX-LARGE	Mindre end 46cm NORMAL	7470	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		46cm og mere X-LANG	7471	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
58,5cm til 66cm	XXX-LARGE	Mindre end 46cm NORMAL	7472	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		46cm og mere X-LANG	7473	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		

KONTRAINDIKATIONER: Massivt ødem i ben eller lungeødem på grund af kongestiv hjerteinsufficiens, alvorlig atherosklerose, ekstrem benedeforitet, lokal tilstand i benene, f.eks. dermatitis/gangræn/nylig hudgraft.



SKRIDTLANGE

Låromkreds 1	Lægomkreds 2	Benlængde 3	Genbestillings nummer HVID	Genbestillings nummer BEIGE	Genbestillings nummer SORT	Salgsenhed	Farve	
							Tå	Top
Mindre end 63,5cm	Mindre end 31cm SMALL	Mindre end 74cm KORT	203340	241679	241828	1 par		
		74cm til 84cm NORMAL	203341	241687	241836	1 par		
		84cm eller mere LANG	203342	241711	242065	1 par		
Mindre end 63,5cm	31cm til 38cm MEDIUM	Mindre end 74cm KORT	203343	241729	242206	1 par		
		74cm til 84cm NORMAL	203344	241737	242214	1 par		
		84cm eller mere LANG	203345	241752	242271	1 par		
Mindre end 63,5cm	38cm til 45cm LARGE	Mindre end 74cm KORT	203346	241478	242370	1 par		
		74cm til 84cm NORMAL	203347	241786	242396	1 par		
		84cm eller mere LANG	203348	241802	242503	1 par		
63,5 til 81cm	38cm til 45cm EXTRA LARGE	Mindre end 74cm KORT	208731	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm til 84cm NORMAL	208732	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		84cm eller mere LANG	208733	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
63,5 til 81cm	38cm til 45cm	Mindre end 74cm KORT	3180	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm til 84cm NORMAL	3181	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		84cm eller mere LANG	3182	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
81,3 til 91,4cm	38cm til 45cm EXTRA LARGE	Mindre end 74cm KORT	3183	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm til 84cm NORMAL	3184	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		84cm eller mere LANG	3185	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		

OBS : Skridtlange strømper er ikke selvstændige, og det kan være nødvendigt at benytte hofteholder.



SKRIDTLANGE M. BÆLTE

Låromkreds 1	Lægomkreds 2	Benlængde 3	Genbestillings nummer HVID	Genbestillings nummer BEIGE	Genbestillings nummer SORT	Salgsenhed	Farve	
							Tå	Top
Mindre end 63,5cm	Mindre end 25cm X-SMALL	Mindre end 71cm NORMAL	764449	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		71cm eller mere LANG	764456	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
Mindre end 63,5cm	25 til 30,5cm SMALL	Mindre end 72cm NORMAL	750604	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		72cm eller mere LANG	750620	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
Mindre end 63,5cm	30,5 til 38cm MEDIUM	Mindre end 72cm NORMAL	750612	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		75cm eller mere LANG	750638	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
Mindre end 63,5cm	38 til 44,5cm LARGE	Mindre end 74cm NORMAL	764464	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		
		74cm eller mere LANG	750646	Findes ikke i beige	Findes ikke i sort	1 par		

TED er et varemærke tilførende Covidien AG eller et associeret selskab. Alle rettigheder forbeholdes.